

Bathmate

Gratulujeme Vám k získání moderní pomůcky pro muže, která byla vyvinuta na základě celé řady výzkumů a poznatků při zkoumání možností modelací penisu, poruchách erekce, smršťování penisu při náročném cvičení a vrcholových sportech.

Bathmate pracuje na podobném principu, jako jsou vakuové pumpy pro muže – tedy vytvořením podtlaku okolo penisu se do topořivých tělísek vtlačí více krve a tím se tělíska zvětšují, získávají elasticitu a zlepšuje se průtok krve. Při pravidelném a dlouhodobějším používání pak může dojít k dočasnému nebo trvalému zvětšení penisu do délky i do šířky. Převratnou novinkou je u Bathmate průměr těsnící manžety, který je mnohem větší než u běžných vakuových pump. Běžná pumpa zaškrcuje penis u kořene a vytváří podtlak pouze od zaškrcení po konec penisu. Naproti tomu Bathmate vytváří podtlak od podbřišku a tím dochází k působení po celé délce penisu a jeho vytahování z pánve.

Použití:

Bathmate je určena pro používání pod vodou (především ve vaně) nebo nouzově i ve sprše. Bathmate se ponoří pod vodu a veškerý vzduch se nechá uniknout z válce i gumového vlnovce. Poté se válec navlékne na penis. Doporučujeme jej navlékat při mírné nebo plné erekci – účinky se tak objevují okamžitě. Také doporučujeme potřít penis malým množstvím silikonového lubrikantu, aby se snížilo tření o vnitřní plochu válce při jeho zvětšování.

Gumový vlnovec usadíte na podbřišek spíše do vyšší polohy směrem k pupku a šourek s varlaty držte úplně vytážený dolů - mimo manžetu. Poté silou přitlačte válec ke stydké kosti a z ventilu na vrcholu Bathmate vyteče malé množství vody. Uvolněte válec a přitlačování opakujte, dokud neucítíte vnitřní tlak v penisu. Pokud by vnější podtlak vyvolával pocit bolesti, stiskněte pod vodou krátce plastový vrchlík na konci válce a tím se podtlak sníží. Takto si můžete upravit velikost podtlaku podle vlastní potřeby. Bathmate ponechte působit 10-15 minut.

V případě, že Bathmate používáte ve sprše, je postup naplňování mírně odlišný. Při plnění ve sprše je nutné mírně zatlačit dovnitř černou gumovou tyčinku na ventilu a držet ji stlačenou po celou dobu plnění. Tím se uzavře ventil oboustranně a voda nevytéká. Naplňte válec až po okraj ze sprchy a dále postupujte podobným způsobem jako ve vaně. Při snižování podtlaku nechte proudit vodu přes ventil, aby se do válce nedostalo příliš vzduchu. Pro použití ve sprše je možno k Bathmate zakoupit Shower Bathmate Strap (u některých modelů je součástí balení), který slouží jako závěs Bathmate popruhem okolo krku a uvolní Vám tak ruce při mytí a ostatních činnostech.

Bathmate se používá denně po dobu alespoň 6 týdnů.

Upozornění:

Bathmate má gumový vlnovec poměrně silný je schopná vodním podtlakem navýšit množství krve v penisu o takové množství, že je nutno po ukončení denního cvičení podtlak snižovat pomalu a postupně – alespoň v průběhu 30 vteřin a je lepší to provádět zpětným napouštěním pod vodou a nikoliv vzduchu. To se provádí zásadně silnějším stiskem plastového vrchlíku a nikoliv vytážením gumového ventilku z vrchlíku. Při prudkém zpětném napuštění běžného tlaku by mohlo dojít k rázové vlně krevního tlaku v organismu a mohla by vzniknout až nevolnost.

Nezavádějte penis v částečné ani plné erekci do vakuové pumpy bez použití lubrikantu na těsnící planžetu. Nerespektováním tohoto doporučení riskujete velmi nepříjemné a bolestivé zranění penisu. Použití vhodného lubrikantu by mělo být při použití vakuové pumpy samozřejmostí.

Doporučení:

Vzhledem k výkonu Bathmate - důrazně doporučujeme její použití konzultovat se svým odborným lékařem.

Zákaz používání:

Bathmate nesmí používat muži, kteří užívají léky na úpravu hustoty krve, při trombóze, poruchách krevního tlaku, nemocné prostatě a při všech nemocech spojených s funkcí srdce, prostaty a močových cest. Bathmate se dále nesmí používat delší než stanovenou dobu a vícekrát než jednou denně. Bathmate zkoušejte zpočátku s velmi malým podtlakem a ihned ji přestaňte používat, pokud se objeví kožní abnormality nebo nápadnější změna barvy penisu.