

Vakuová pumpa pro muže – nevibrační, manuální

Návod k použití

Vakuová pumpa pánům efektivně pomáhá v boji s většinou erekčních problémů. Díky jemnému tlaku se totiž dostává krev do tkáňových struktur penisu a pánská chloubka tak vydrží v pozoru mnohem déle. Manuální vakuové pumpy využívají **principu opakovaného stisknutí balonku či ramene** a následného vytvoření podtlaku. Masáž manuální vakuovou pumpou využívá podtlak k mechanické stimulaci pokožky a podkožních tkání.

Upozornění:

Vakuová pumpa pro pány je bezpečné zařízení, pokud je používána v souladu s návodem a zdravým rozumem. Vakuovou pumpu nepoužívejte bez konzultace s lékařem v případě, že máte potíže s krevním oběhem, užíváte léky na tlak, máte cukrovku nebo máte jakékoliv nebezpečí trombózy a jiné vážnější onemocnění.

Parametry:

Materiál: ABS plast, akrylát (PMMA), silikon

Popis výrobku:

Pumpy jsou vyráběny z různých materiálů. Skládají se ze stiskacího balonku nebo stiskací rukojeti, hadičky, válce a manžety.

Ovládání: je manuální tzn. po nasazení válce opakovaně stisknete balonek nebo ramena rukojeti, čímž se vytváří podtlak ve válci. Pokud se podtlak stává nepříjemným, uvolníte ho bezpečnostním zpětným ventilem.

Použití:

1. Pumpu důkladně omyjte teplou vodou a mýdlem, případně použijte **dezinfekční prostředky bez alkoholu** pro erotické pomůcky. Tuto očistu proveďte i před každým dalším použitím a po použití.

2. Vakuovou pumpu přiložte ideálně na oholená místa, která jsou, stejně jako manžeta, potřena lubrikačním gelem. Potření gelem na kůži protáhněte o cca 3-5 cm, protože pumpa často vsává okolní kůži, což by bez lubrikace mohlo způsobit efekt spálené kůže. Použít můžete jakýkoliv lubrikační gel, doporučujeme lubrikační gely na bázi silikonu, které jsou kluznější a chrání a impregnují latexové manžety.

3. Pumpu přiložte ke kořeni penisu bez erekce, varlata zůstanou vně.



VAKUOVÁ
PUMPA
SE STISKACÍ
RUKOJETÍ

4. Podtlak se vytvoří stlačením balónku, tahem pístu nebo páky (podle typu vakuové pumpy). Můžete využít i spolupráci partnerky/partnera, je však důležité komunikovat a nevytvořit větší podtlak než je příjemné. Podtlak nesmí bolet, masáž musí být příjemná a penis by neměl měnit výrazně barvu. Také se nesnažte dosáhnout hned napoprvé maximálních hodnot podtlaku.

5. Čím déle bude vakuová pumpa v podtlaku, tím lepší a pevnější erekce nastane. Pro první použití doporučujeme 7-10 minut, poté 15-20 minut. Dobu 15-20 minut doporučujeme také pro trénink topořivých tělísek, kdy je penis opakovaně přiváděn do maximální erekce a poté je tlak uvolňován, případně některé pumpy již mají takto přednastaveny tréninkové programy. Více minut nedoporučujeme.

6. Stiskem zpětného ventilu u hrdla válce napustíte vzduch zpátky do pumpy a dojde k uvolnění. Zpětný ventil, který vrací vzduch zpět do válce, bývá hned u válce a u pump s balónkem mezi balónkem a hadicí, hned nad balónkem. U pákových vývív je v místě, kam se připojuje hadička. Pumpu si před použitím důkladně prohlédněte a vyzkoušejte, abyste mohli zareagovat ihned, jakmile nebude podtlak již příjemný. Při vypouštění vzduchu volte pomalé upouštění, nikoliv rychlé!

7. Pro udržení erekce i po sundání pumpy doporučujeme použít erekční kroužek (nejlépe stahovací). Ten je třeba předem navléknout na kořen penisu v povoleném stavu a utáhnout jej v okamžiku sejmutí podtlakového válce. V tom případě si důkladně prostudujte návod i k erekčnímu kroužku.

8. Po použití pumpu omyjte teplou vodou a mýdlem, ideálně použijte **dezinfekci bez alkoholu** pro erotické pomůcky. Poté pumpu důkladně vysušte a skladujte ji na suchém a tmavém místě, aby nebyla pod vlivem slunečního světla a vysokých či nízkých teplot. Latexovou manžetu udržujte vláchnou silikonovým gelem.

K pumpám zn. BOOM a BASIC X lze dokoupit různá příslušenství: manžety, umělé vaginy nebo náhradní díly. Jeden základ + příslušenství, které si dokoupíte = více využití.

Lubrikační gel:

při použití výrobku nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. Vzhledem k tomu že manžeta je ze silikonu doporučujeme lubrikant na bázi vody nebo **silikonový lubrikant BOOM**, který lze použít i na silikonové pomůcky. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

Doporučení:

Přerušete používání výrobku, pokud zaznamenáte nepříjemné pocity.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen. Výrobek nepatří do rukou dětem!



Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů ze silikonu nebo jiných materiálů - s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.
Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.
Nenechávejte produkt na světle, především na slunci a v blízkosti topných těles.
Používání erotických pomůcek je na vlastní nebezpečí každého uživatele.